


scooterpac[®]



Mode d'emploi protection de pluie



scooterpac™

ScooterPac: idéal par temps de pluie ou de soleil

Lisez le manuel pour tirer le maximum de votre protection de pluie pliable.

Table des matières

- 1 Avertissements et consignes de sécurité
- 2 Utilisation de la protection de pluie
- 3 Introduction relative au produit
- 5 Guide de démarrage rapide
- 7 Contenu de la boîte
- 9 Outils nécessaires
- 10 Spécifications techniques
- 11 Montage de la protection de pluie pour scooter
- 19 Manuel d'utilisation détaillé de la protection de pluie
- 20 Comment utiliser la protection de pluie
- 30 Replier la protection de pluie
- 37 Entretien de votre protection de pluie ScooterPac

Le rayon de
soleil de votre
journée



Avertissements et consignes de sécurité

Il est fortement recommandé de lire ce chapitre avant d'utiliser votre protection de pluie. Consultez ces avertissements et consignes de sécurité pour utiliser votre protection de pluie en toute sécurité durant de nombreuses années. Conservez ce manuel pour toute consultation ultérieure. ScooterPac ne peut être tenu responsable d'éventuels préjudices dus à une mauvaise utilisation ou au non-respect des indications de ce manuels.

Toutes les illustrations de ce manuel sont utilisées à titre représentatif. Votre protection de pluie peut être différente de ces illustrations. ScooterPac se réserve le droit de corriger ce manuel ou de le modifier sans aucun avertissement préalable.

Le montage de cette protection de pluie peut uniquement être réalisé par une personne valide et à l'aide des outils indiqués dans ce manuel.

Le chapitre relatif à la fixation de la protection de pluie sur votre scooter part du principe que votre scooter est équipé de points de fixation. ScooterPac ne peut être tenu responsable en cas de perte, de dommage ou de préjudice corporel sur votre personne ou un tiers causé par l'emploi d'un point de fixation inadéquat ou d'une fixation insuffisamment sûre et solide de la protection à votre scooter.

Utilisation de la protection de pluie

- Assurez-vous que la protection de pluie est correctement attachée au scooter et que toutes les étapes d'installation ont été effectuées.
- Conservez les mains à distance des pièces mobiles et respectez uniquement les instructions de montage indiquées dans ce manuel.
- Assurez-vous que la protection de pluie est utilisée correctement et que les deux portes sont complètement fermées lors de l'utilisation.
- Utilisez uniquement la protection de pluie sur des scooters équipés de tous les points de fixation nécessaires.
- Vérifiez que tous les systèmes de fixation sont correctement mis en place et n'utilisez pas la protection de pluie si vous trouvez des pièces endommagées ou défectueuses avant l'utilisation.
- Contactez votre revendeur ScooterPac local pour commander des pièces de rechange pour votre protection de pluie.
- La protection de pluie s'utilise uniquement en position totalement dépliée, ou en position totalement repliée si elle est recouverte de sa housse de protection.
- Évitez de replier ou déplier la protection de pluie lorsque vous êtes assis sur le scooter.
- N'utilisez pas la protection de pluie en position dépliée si la vitesse du vent est supérieure à 39 km/h.
- La protection de pluie convient uniquement à une utilisation sur voie carrossable ou sur route.



Introduction relative au produit





Mécanisme de blocage



Étrier de fixation universel



Clavette de montage



Guide de démarrage rapide



Fixez la protection de pluie à votre scooter conformément aux instructions de ce manuel



Dépliez ensuite la protection de pluie



Astuce : Demandez à votre spécialiste de monter la protection de pluie ou consultez la page 11 pour obtenir des instructions étape par étape détaillées.



Ouvrez les parois latérales



Fermez ensuite les parties latérales à l'aide la fermeture éclair pour une protection totale !






Contenu de la boîte

Que contient la boîte ?

1. Cadre x 1



2. Clavette x 1

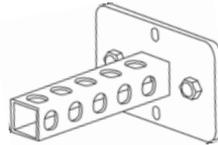

3. Écrous Nyloc M8 x 2



4. Rondelles M8 x 2



10. Boulon Hex M6 x 1



11. Écrou Nyloc M6 x 1




12. Rondelles M6 x 2



5. Bâche de protection x 1



4. Housse de protection x 1

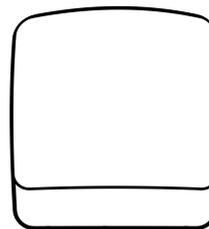

9. Bandes velcro



7. Boulon M10 x 45mm x 1



8. Boulons M8 x 45mm x 3



9. Kit de fixation

Outils nécessaires

Clé(s) Allen
(4mm/5mm/6mm)



Clé(s) à fourche
(10/13mm)



Outils potentiellement nécessaires

Clé fermée
(10mm/13mm)



Paire de ciseaux



Spécifications techniques

Produit	Dimensions	Hauteur	Longueur	Largeur
Antares 3/4	M		1500 mm	610 mm
Venus 3V/4V	M		1500 mm	610 mm
Venus 4 sport	M		1500 mm	610 mm
Ceres 3/4 DL	M	1630 mm	1500 mm	610 mm
Carpo 2	L			
Mercurius 4 LTD	L			

Montage de la protection de pluie pour scooter



Étape 1. Glissez la clavette sur la semelle de fixation du cadre du scooter pour la fixer.

Placez ensuite le boulon M6 sans le visser.

Vissez les écrous M8. Vissez l'écrou M6.



Étape 3.

- A) Glissez la clavette dans la barre accessoire, insérez ensuite le boulon M8 de 45 mm (fourni) dans l'écrou de la barre accessoire et serrez.
- B) Si la barre accessoire n'est pas dotée d'écrous, insérez le boulon directement à travers la barre. (Cela implique de percer un trou de 8 mm à travers la barre accessoire et la clavette).



A





B



Astuce : ouvrez les étriers universels avant de fixer la protection au cadre.

Étape 4. Dévissez les boulons des appui-bras du scooter.

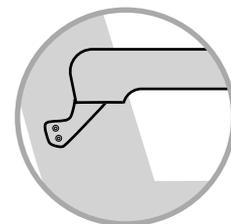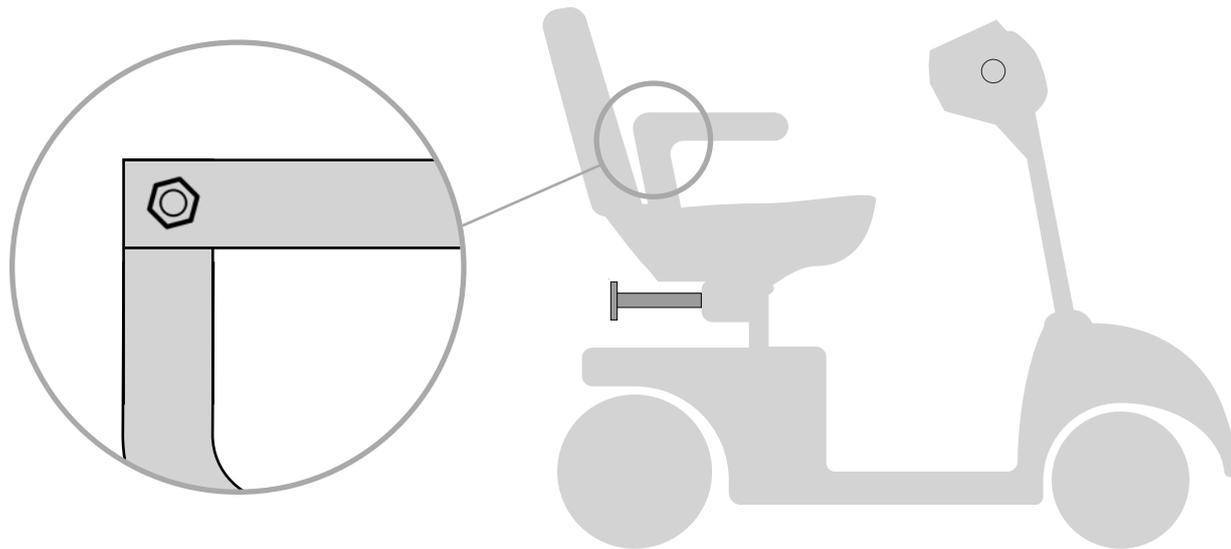

Astuce : si les appui-bras sont intégrés au siège, enlevez le boulon supérieur - voir illustration 1.


Illustration 1.

Étape 5. NB : référez-vous à la page 15 avant d'effectuer cette étape.

Détachez les pinces quick release (A) de l'étrier de fixation et desserrez les vis à six pans intérieurs de la pince en plastique (B). Fixez maintenant les étriers aux appui-bras, utilisez à cet effet les boulons que vous avez précédemment enlevés ou les boulons de 45 mm fournis, si besoin est. Vérifiez que chaque écrou Nyloc dispose d'un boulon d'une saillie de 2 mm minimum. Serrez les fixations des étriers au maximum et insérez les vis à six pans intérieurs dans la gaine en plastique.



B

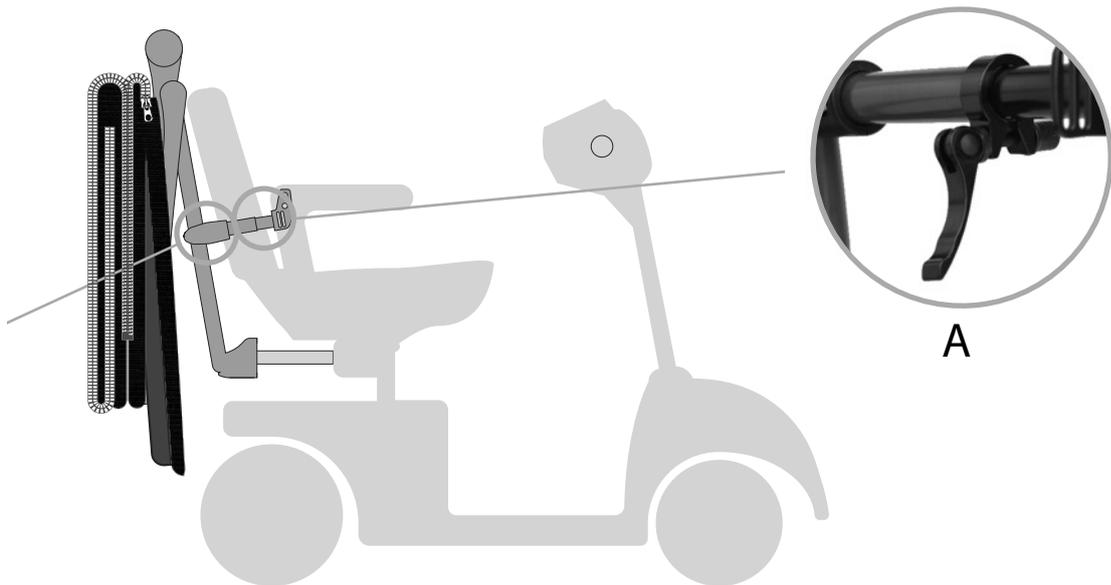


A




Astuce : Les extrémités de l'étrier peuvent être orientées vers le haut ou vers le bas afin de pouvoir l'adapter au mieux à votre scooter.

Si vous n'êtes pas en mesure de terminer l'étape précédente en raison d'un manque de boulons adéquats ou de points de fixation, les bandes velcro fournies pareront à cette situation. Faites passer les bandes velcro dans les étriers (Illustration 2) et fixez-les solidement autour des appuie-bras du scooter. Vérifiez que les bandes sont bien tendues afin d'éviter tout mouvement.

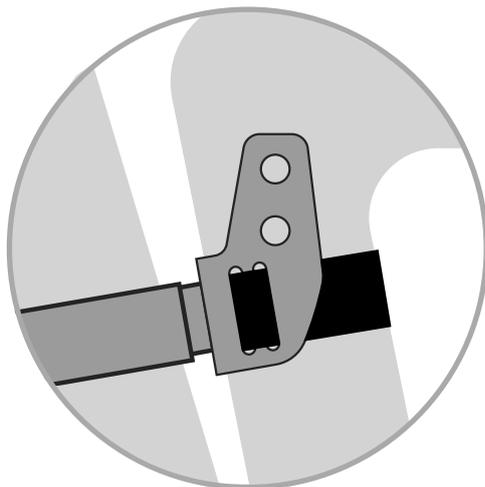

(Illustration 2)

Étape 6. Une fois le montage réalisé, la pince en plastique doit être accrochée au cadre de base avant d'être vissée à l'aide des 3 vis à six pans intérieurs (Illustration 3). Vérifiez que le cadre est attaché de manière sûre et solide afin d'éviter tout mouvement. Le bras télescopique doit être placé suffisamment loin dans le tube extérieur afin de garantir une fixation suffisante avec la pince quick release.

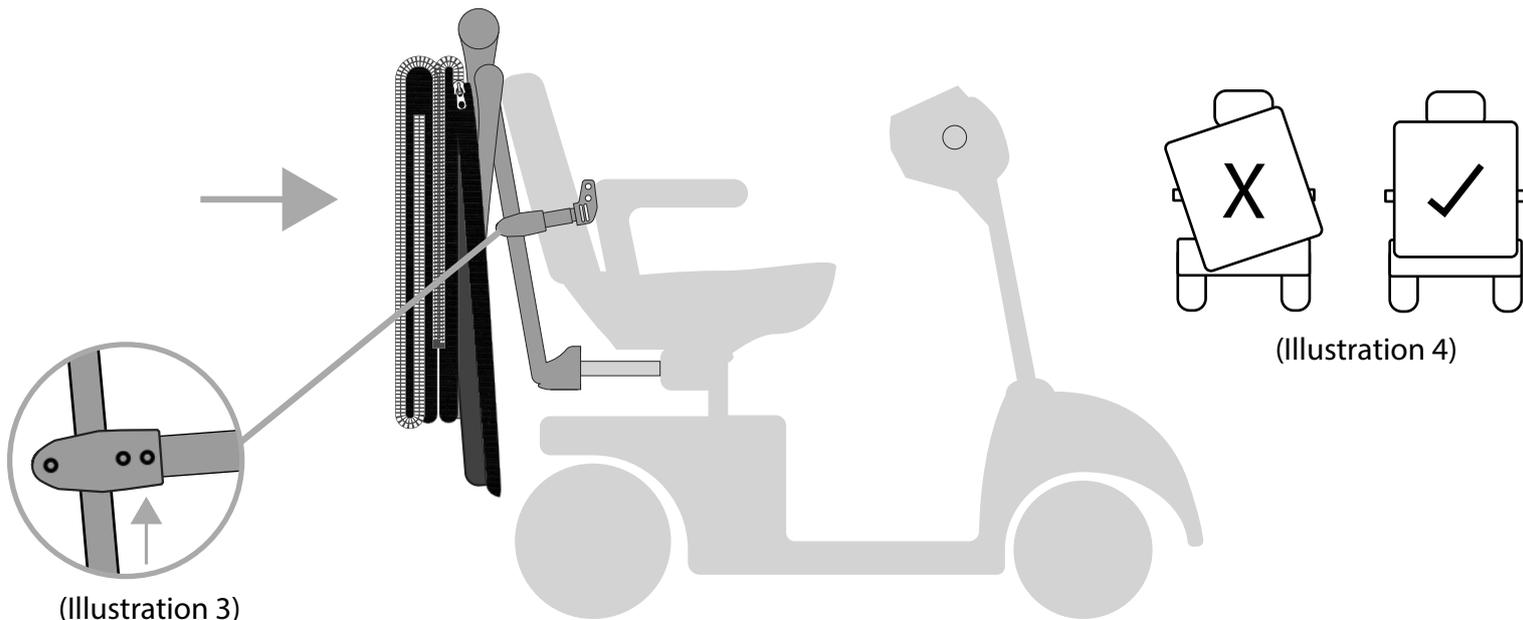


Vu de l'arrière, la protection de pluie doit être en position verticale (illustration 4), vérifiez que c'est bien le cas avant de continuer. Si nécessaire, ajustez les bras en desserrant les vis à six pans intérieurs et en les faisant glisser vers le haut et vers le bas.

Étape 7. Vous pouvez maintenant déplier le cadre de votre protection de pluie et monter la bâche résistant aux intempéries. Posez la bâche résistant aux intempéries sur le toit du cadre et déployez. Fermez la fermeture éclair des parois latérales de la protection de pluie et placez simultanément la bande velcro autour du pare-brise afin d'assurer un positionnement correct. Fixez la protection au cadre à l'aide de l'ensemble des 6 bandes velcro prévues. (Ouvrez la porte latérale gauche pour attacher les bandes de sécurité du côté droit et inversement).




Il se peut que vous deviez avancer votre siège ou retirer les rétroviseurs afin d'éviter que ces éléments touchent les parties latérales.

La protection de pluie est maintenant prête à l'emploi!

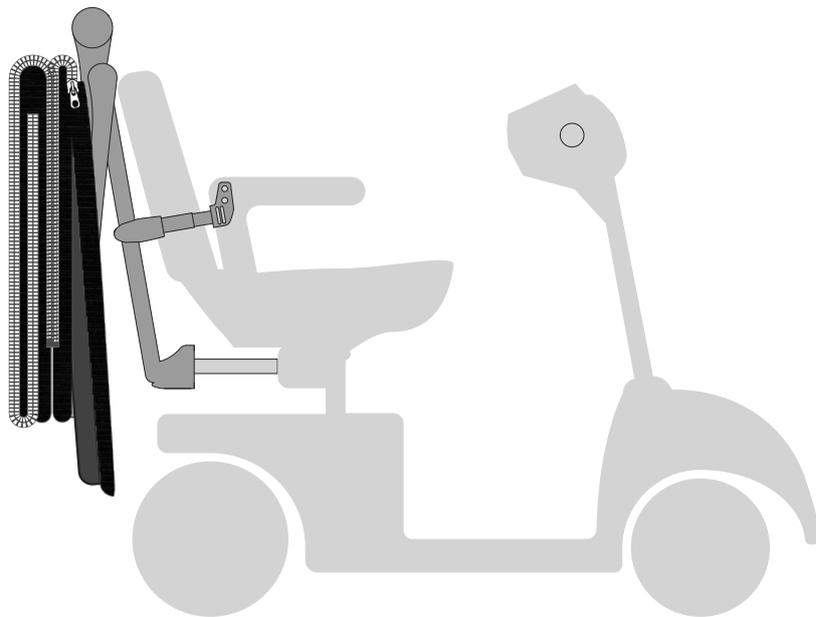

Sur certains modèles de scooters, la protection de pluie peut cacher les phares. N'utilisez pas votre scooter sur la route si les phares sont obstrués.

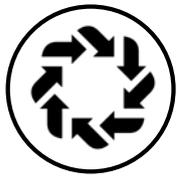

Manuel d'utilisation détaillé de la protection de pluie

La protection de pluie pliable ScooterPac est aussi belle que fonctionnelle.

Pour arriver à ce résultat, nous avons prévu un velcro à code de couleurs ainsi qu'un matériau très souple et d'autres innovations facilitant au maximum son utilisation.


Respectez ces règles simples pour tirer le maximum de notre ScooterPac.




Astuce : Référez-vous à la page 7 pour le diagramme des pièces.

Comment utiliser la protection de pluie

Étape 1. Enlevez le sac de rangement en détachant le velcro du bas et en le retirant du sac. Remettez ensuite le cadre de base en position.

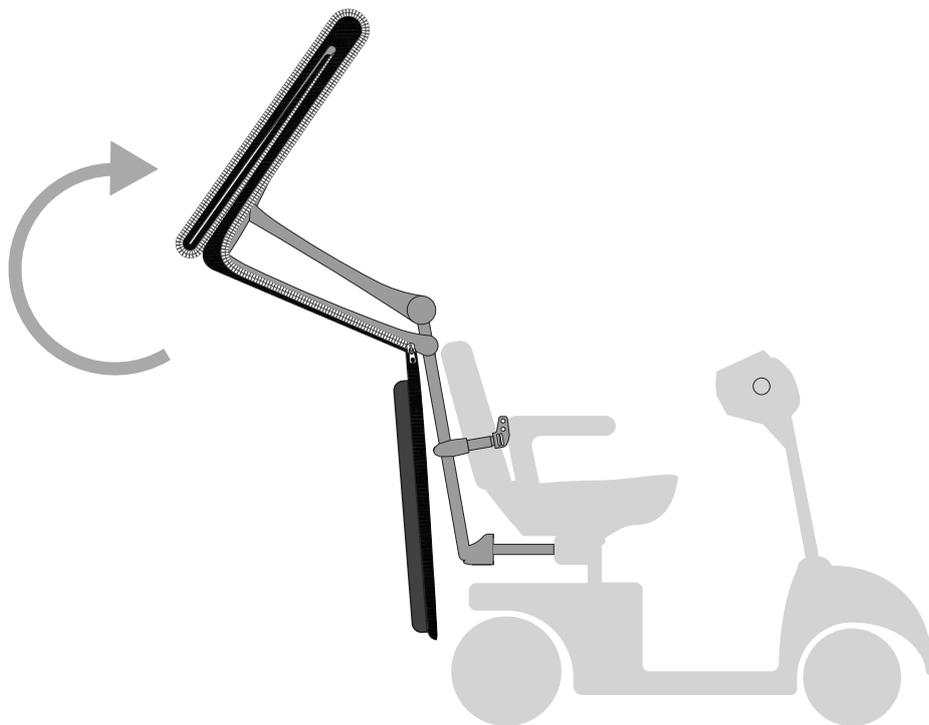


Étape 2. Le piston latéral se fixe en position.

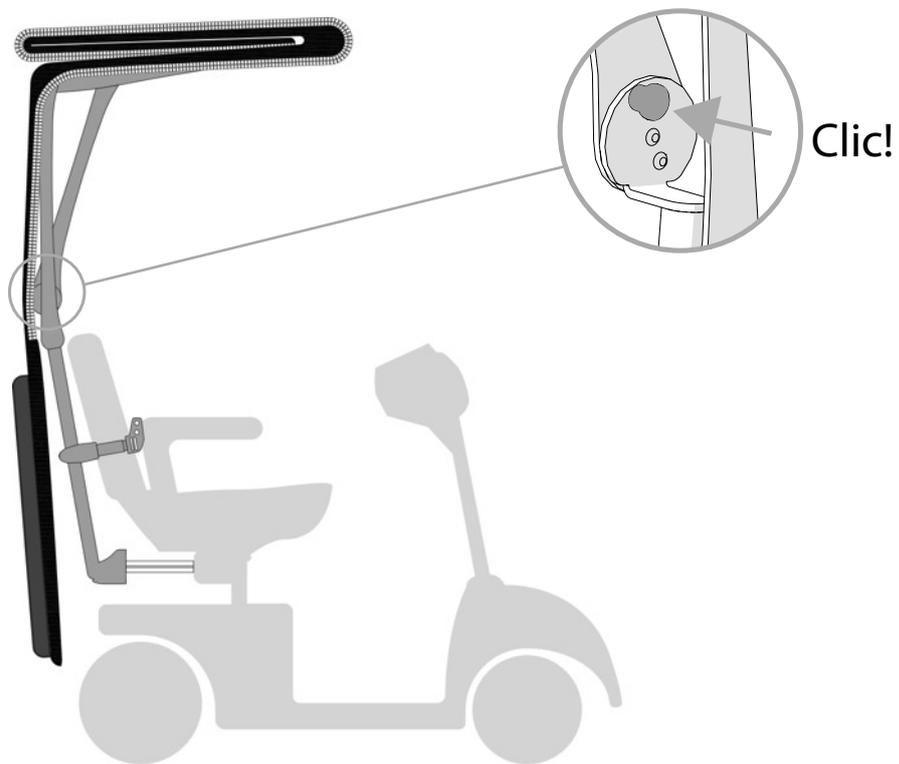


Étape 3. Repliez le pare-brise vers le bas.




Étape 4. Repliez la paroi de protection avant vers le bas à l'avant du scooter.

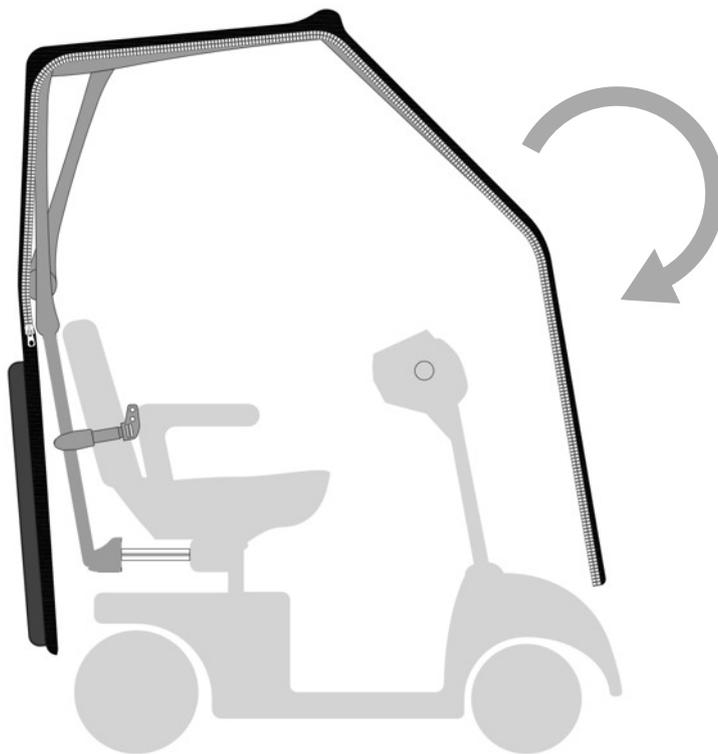

Étape 5. Les parois de protection latérales peuvent maintenant être dépliées autour des parties latérales depuis l'arrière du scooter.

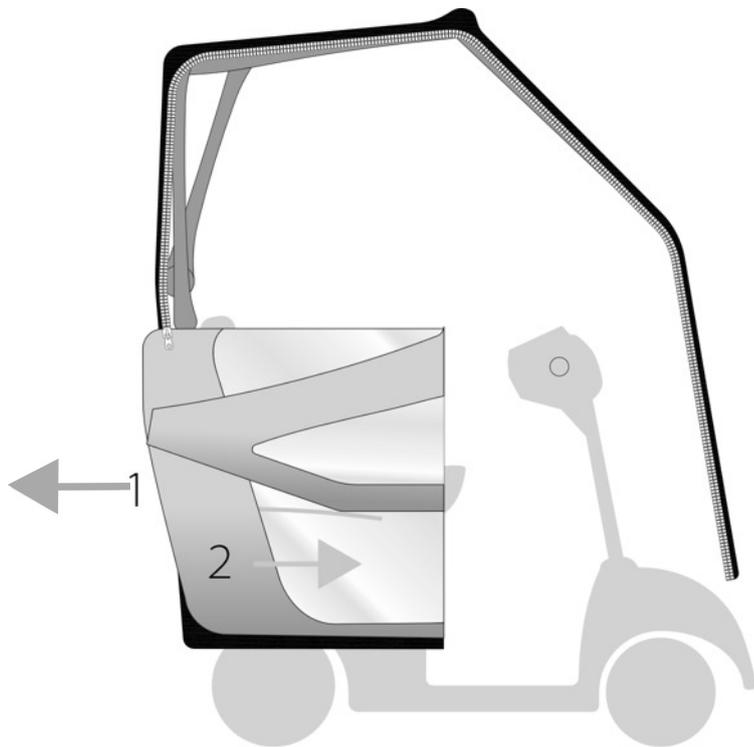

Étape 6. Ramenez la fermeture éclair entourant le scooter vers l'avant en tenant le coin supérieur de la paroi latérale. Répétez cette étape de l'autre côté.

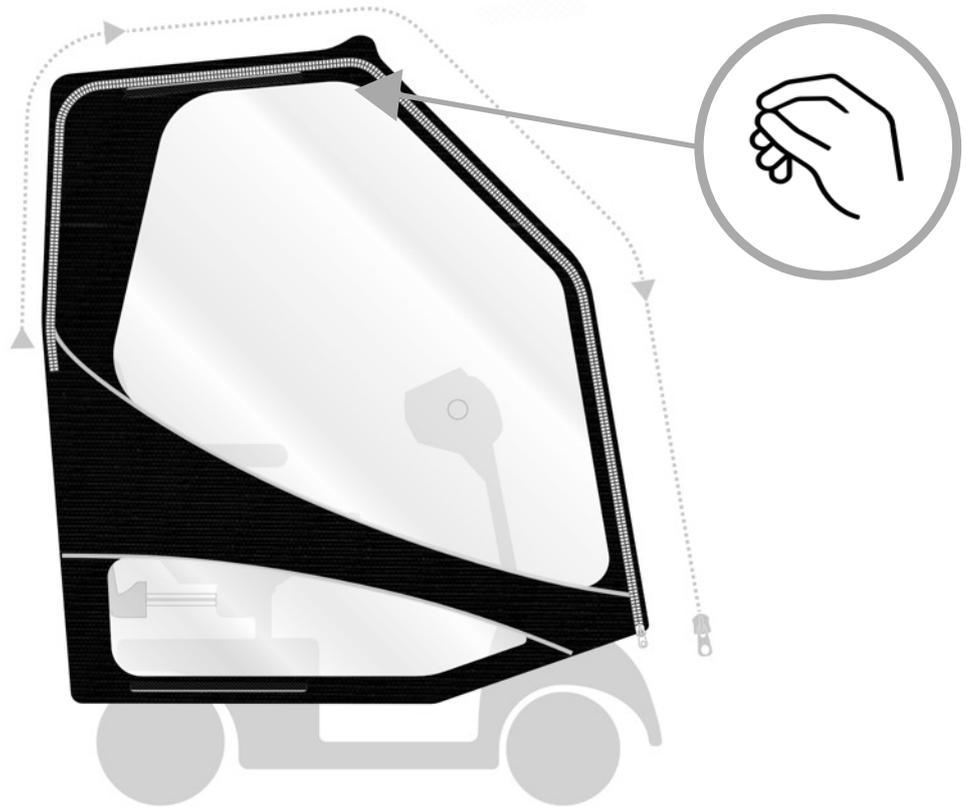


Étape 7. Vous pouvez maintenant attacher la bâche de protection à l'avant du scooter en appliquant la méthode expliquée ci-dessus.




1) Attache centrale autour du pare-chocs.

1.

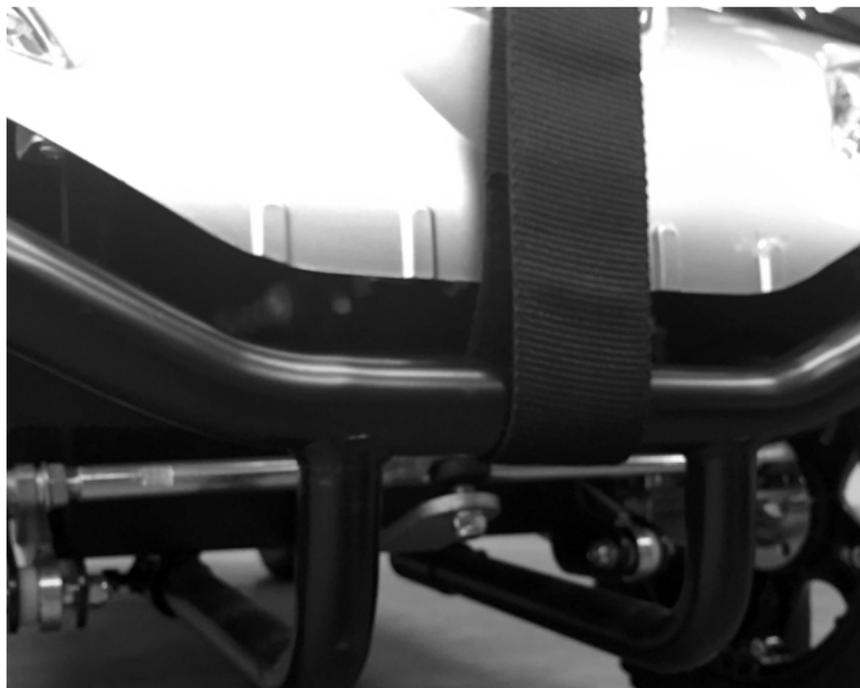

⚠ Assurez-vous que l'attache centrale ne gêne pas ou enlevez-la si vous ne l'utilisez pas afin d'éviter tout enchevêtrement avec les roues.

Étape 8. Vous pouvez maintenant utiliser la protection de pluie. Pour accéder au scooter, ouvrez simplement la fermeture éclair située au bas de la protection de pluie.

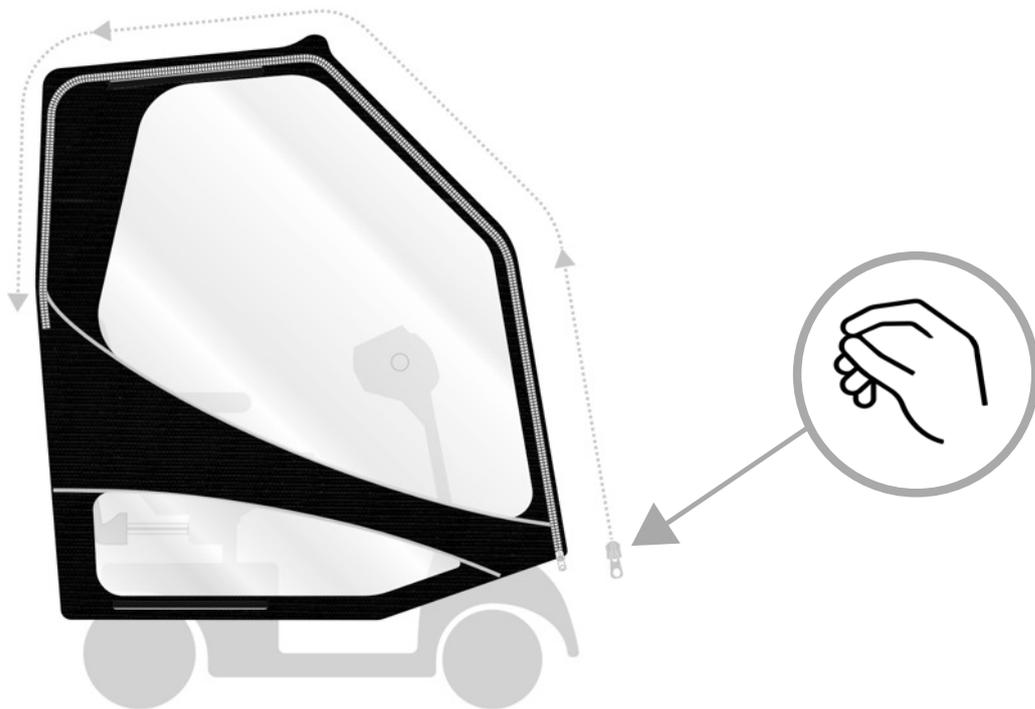

Si vous devez glisser votre panier à l'intérieur de la bâche de protection (Illustration 5). Enlevez la fenêtre d'accès prévue pour le panier et faites-le passer par cette ouverture, placez ensuite la bande plastique de l'ouverture dans le panier.




(Illustration 5)



(Illustration 6)

Pour ouvrir la protection de pluie à un carrefour, pour déposer une lettre ou autre, il vous suffit d'ouvrir la fermeture éclair de la protection de pluie en la tirant vers l'arrière pour sortir.

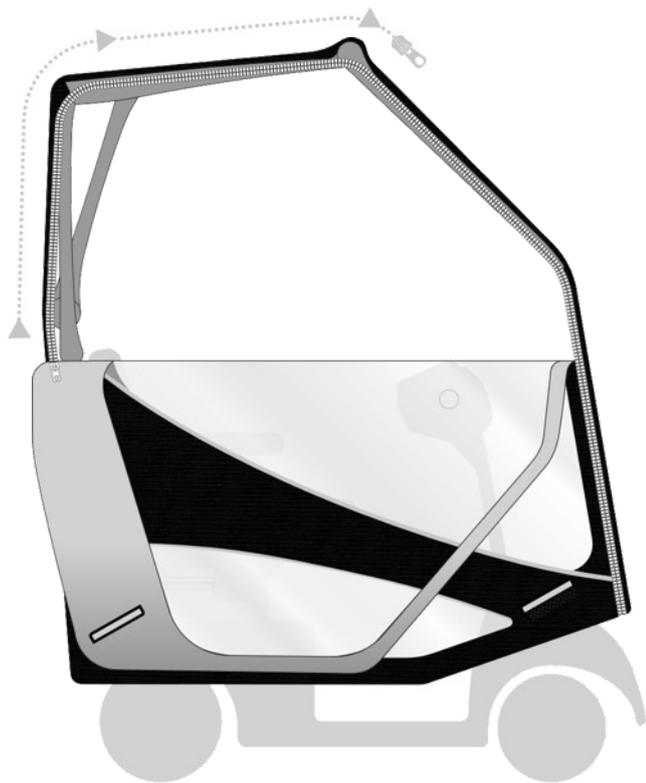


Le scooter ne peut pas être utilisé avec la protection de pluie dans cette position.


Replier la protection de pluie

Étape 1. Ouvrez la fermeture éclair en partant du bas en tenant la protection de pluie par son centre (1).


Cela simplifie l'étape suivante, à savoir que le velcro jaune de la partie supérieure du panneau latéral correspond à sa partie inférieure.

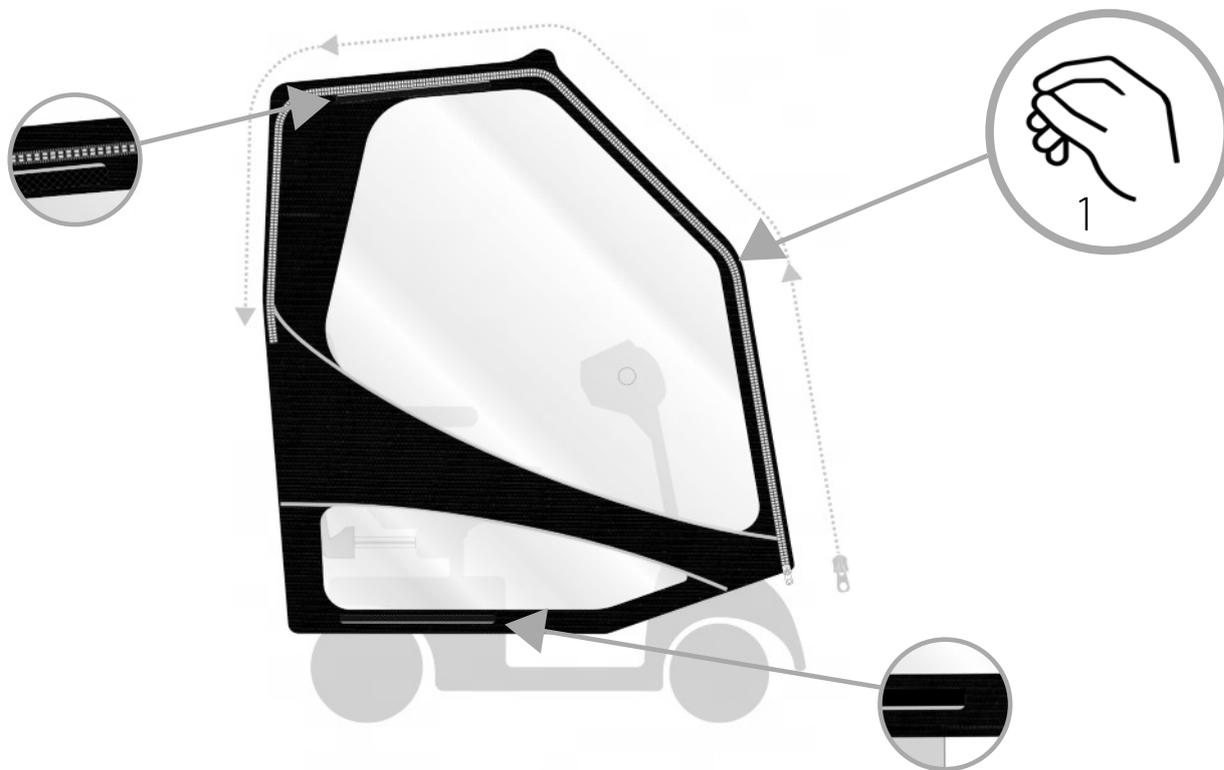


Étape 2. Pliez le panneau latéral de part et d'autre de telle sorte que le velcro gros corresponde au velcro gris.

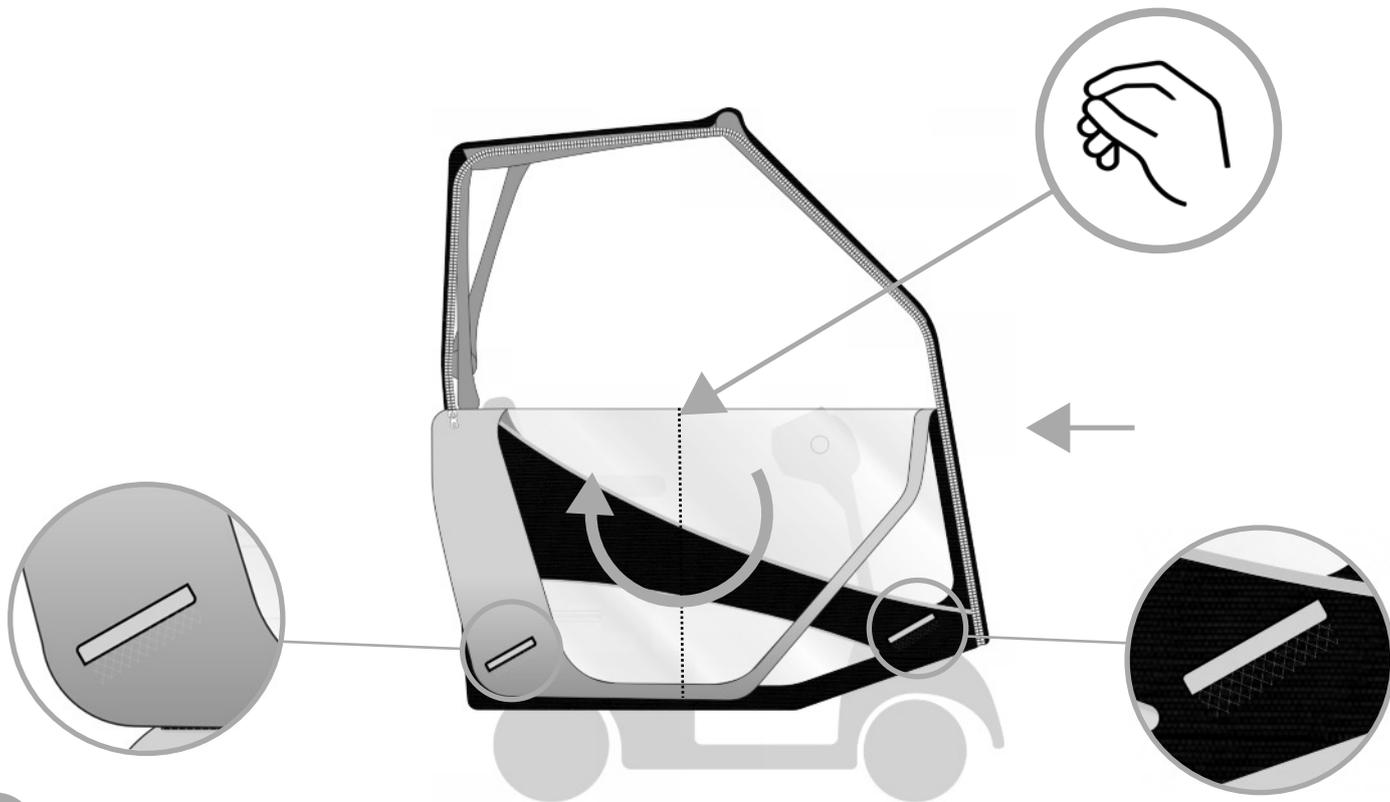


Étape 3. Repliez le panneau situé à l'arrière du scooter de telle sorte que le velcro rouge corresponde au velcro rouge, et repliez-le vers l'arrière autour du cadre. Répétez cette étape des deux côtés.

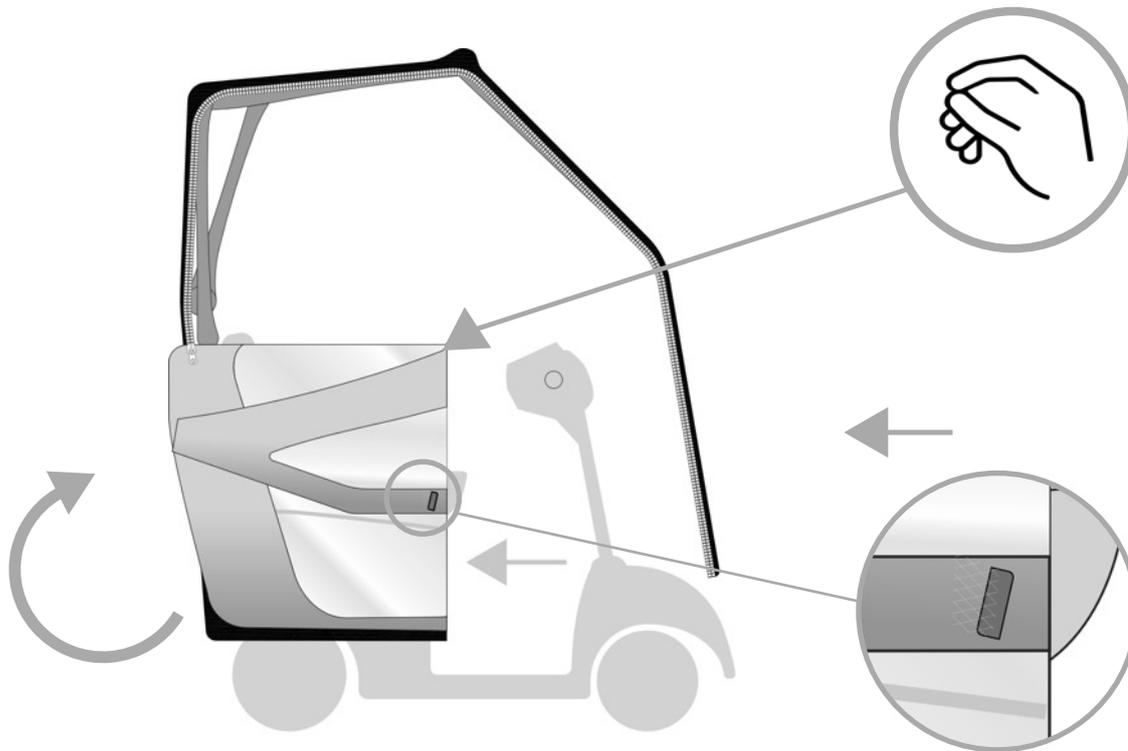

Étape 4. Détachez le velcro de fixation situé à l'avant, pliez le panneau de protection avant et détachez les bandes velcro correspondantes situées au-dessus du pare-brise.

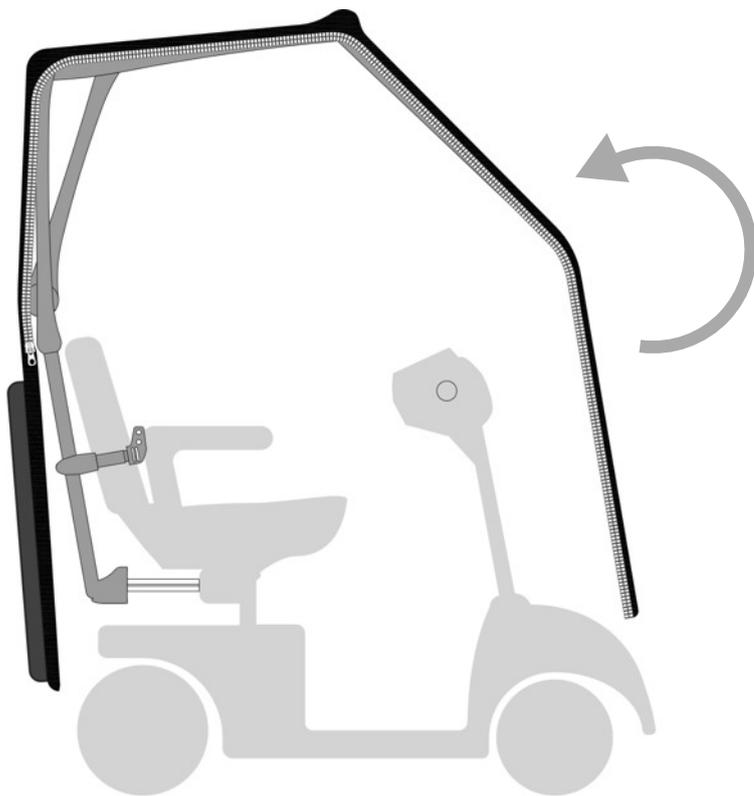


Étape 5. Repliez le pare-brise sur le toit.

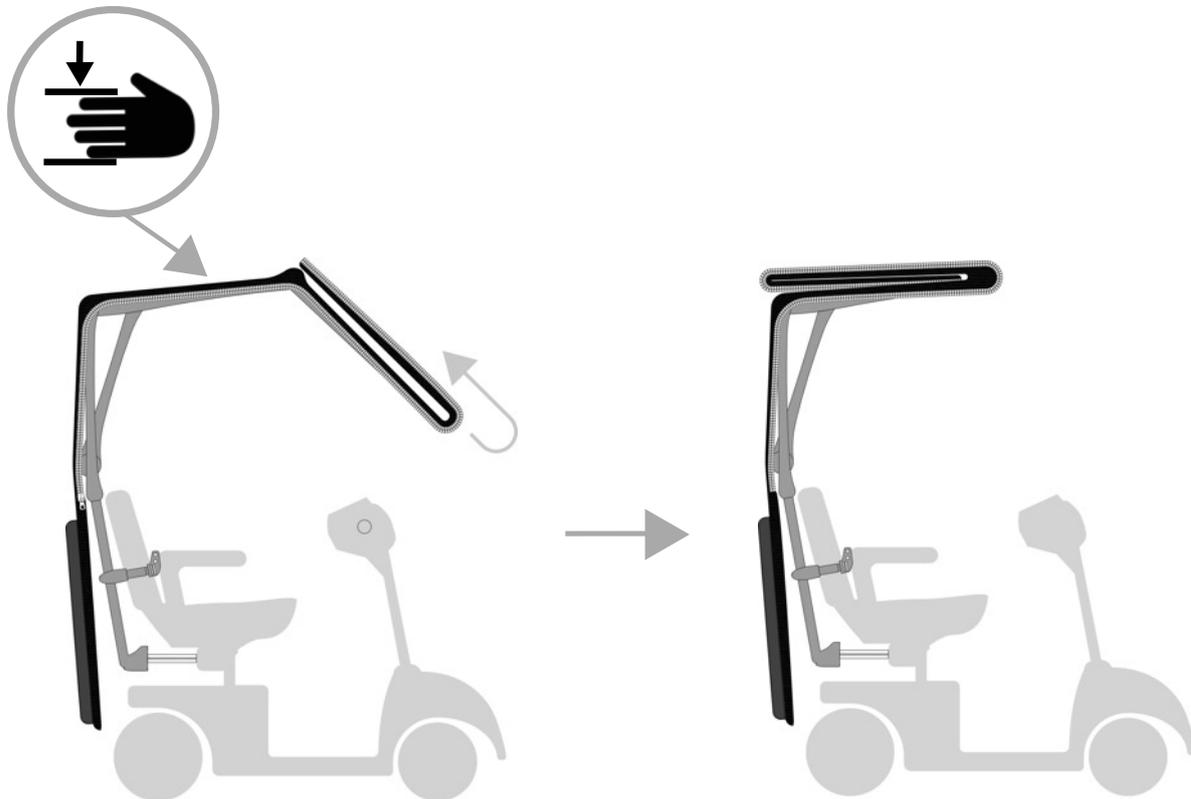


⚠ Attention à ne pas vous pincer la main lorsque vous repliez cette partie.

Étape 6. Enlevez le piston et pliez le cadre en direction de l'arrière du scooter.

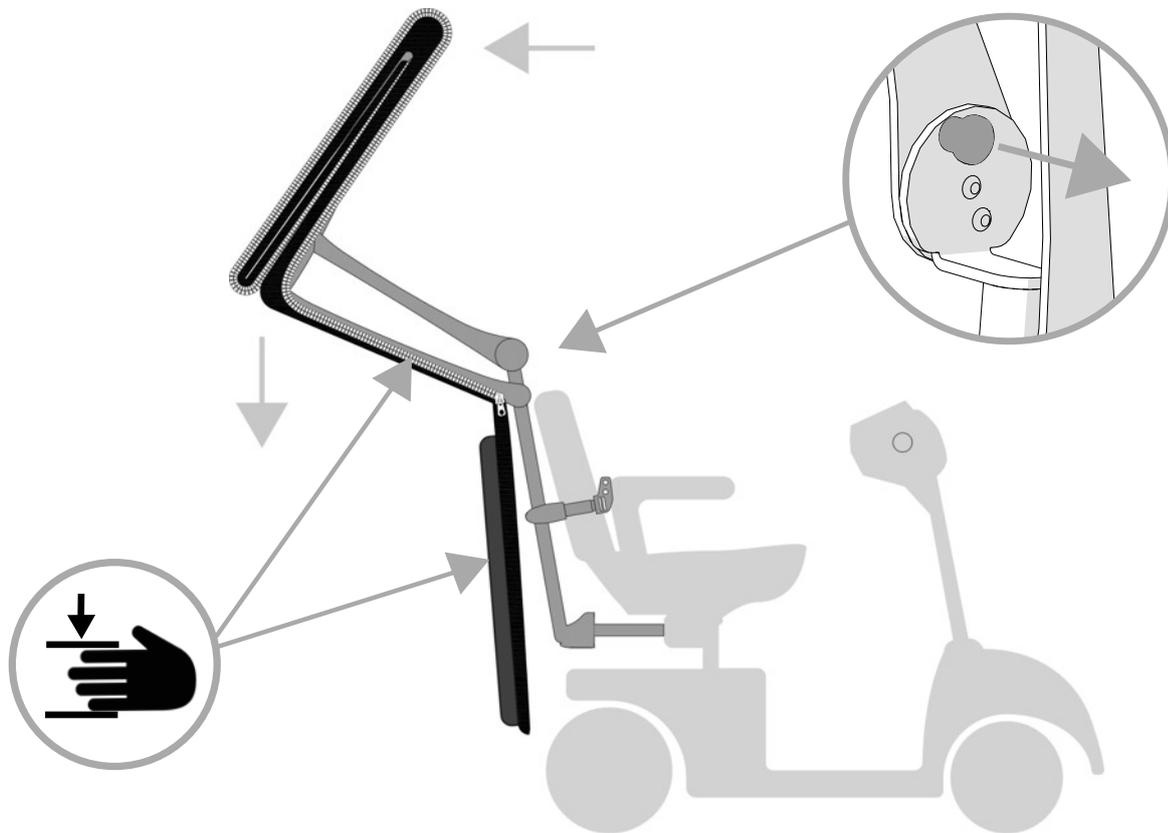

Étape 7. Faites coulisser la housse de protection sur la protection de pluie. La protection de pluie est maintenant complètement en place.

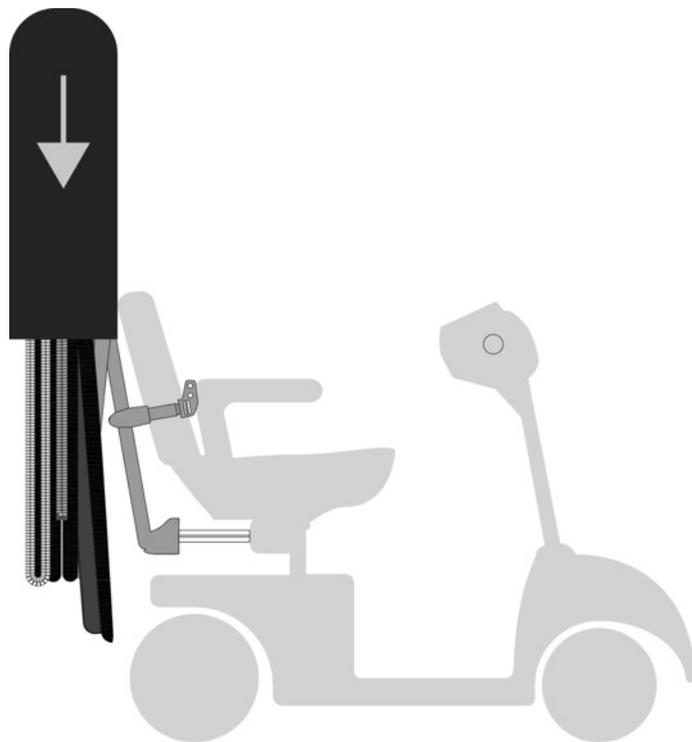



Entretien de votre protection de pluie ScooterPac

La protection de pluie ScooterPac est fabriquée dans un matériau imperméable et résistant à la moisissure. Cela n'empêche pas la saleté habituelle de trouver son chemin! Nous conseillons de nettoyer la protection de pluie à l'aide d'eau savonneuse et d'une éponge. **NE PAS UTILISER D'EAU DE JAVEL.**

Dépliez complètement la protection de pluie dans un endroit bien ventilé pour la faire sécher avant de l'utiliser à nouveau.

Cachet du
revendeur




scooterpac