




TROUVEZ VOTRE  
**TAILLE IDÉALE**

Guide pour mesurer et choisir la  
bonne taille de votre solution de  
positionnement Neoflex.

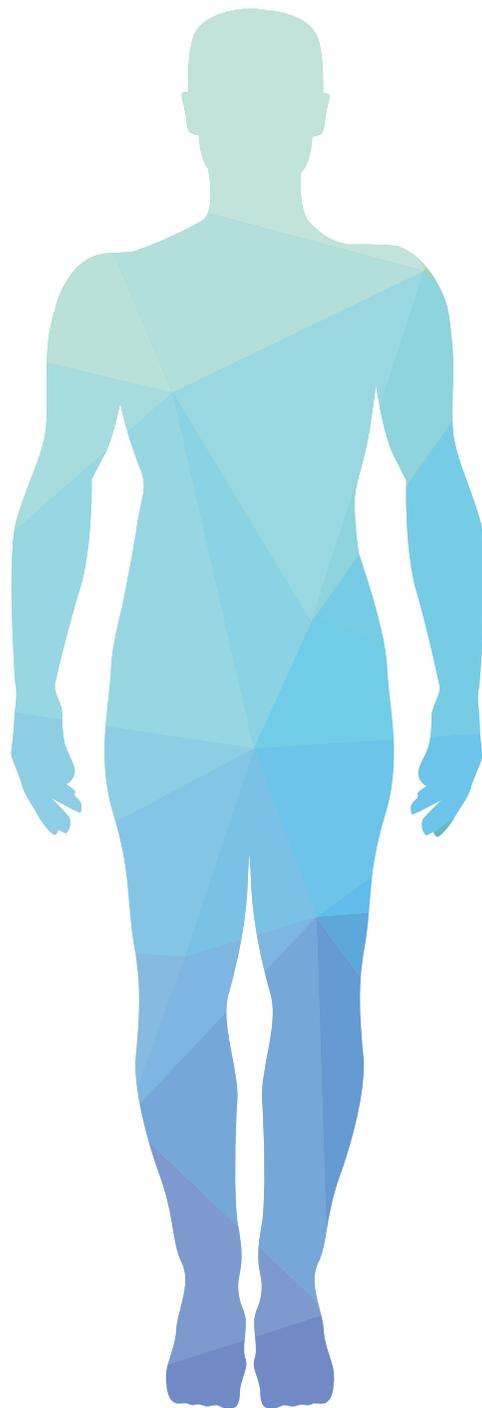

## Neo 00 Multi-usages

- Neo 00.01 Bande multi-usages
- Neo 00.02 Bande multi-usages extension

## Neo 20

- Neo 20.01 Support Thoracique - Large
- Neo 20.02 Support Thoracique - avec Zipper - Large
- Neo 20.03 Support Thoracique - Mince
- Neo 20.04 Support Thoracique - avec Zipper - Mince
- Neo 20.05 Harnais d'épaule
- Neo 20.06 Harnais d'épaule lié
- Neo 20.07 Ceinture Thoracique

## Neo 30

- Neo 30.01 Ceinture Hanche 2 points
- Neo 30.02 Ceinture Hanche 4 points
- Neo 30.03 Sangle Pelvienne

## Neo 40

- Neo 40.01 Support Mollet
- Neo 40.02 Support Cheville




# COMMENT MESURER?

Neo 00.01 Bande multi-usages

Neo 00.02 Bande multi-usages extension

Mesurez la circonférence totale de la poitrine et du dossier, ajoutez 15 à 20 cm et reportez cette dimension dans le tableau ci-dessous pour trouver la bonne taille.

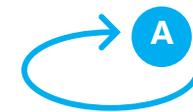

A	Taille
<80 cm	S
80-120 cm	M
121-140 cm	L
141-160 cm	XL

# COMMENT MESURER?

**Neo 20.01** Support Thoracique - Large

**Neo 20.02** Support Thoracique - avec Zipper - Large

**Neo 20.03** Support Thoracique - Mince

**Neo 20.04** Support Thoracique - avec Zipper - Mince



Mesurez la largeur de la poitrine sous les bras et reportez cette dimension dans le tableau ci-dessous pour trouver la bonne taille.



B	Taille
>24 cm	XS
25-26 cm	S
27-32 cm	M
33-39 cm	L
40-46 cm	XL

# COMMENT MESURER?

Neo 20.05 Harnais d'épaule

Neo 20.06 Harnais d'épaule lié



Mesurez la longueur totale du haut de l'épaule à la base du coude et reportez cette mesure dans le tableau ci-dessous pour trouver la bonne taille.



A	Taille
25-30 cm	S
31-37 cm	M
38-40 cm	L
41-45 cm	XL

# COMMENT MESURER?

**Neo 30.01** Ceinture Hanche 2 points

**Neo 30.02** Ceinture Hanche 4 points

**Mesurez la largeur du bassin** et reportez cette dimension dans le tableau ci-dessous pour trouver la bonne taille.




A	Taille
25-33 cm	XS
31-40 cm	S
39-52 cm	M
48-65 cm	L

# COMMENT MESURER?

## Neo 30.03 Sangle Pelvienne

Mesurez la distance entre la surface d'assise et la partie extérieure de la cuisse, comme indiqué sur l'image, et reportez cette dimension dans le tableau ci-dessous pour trouver la bonne taille.

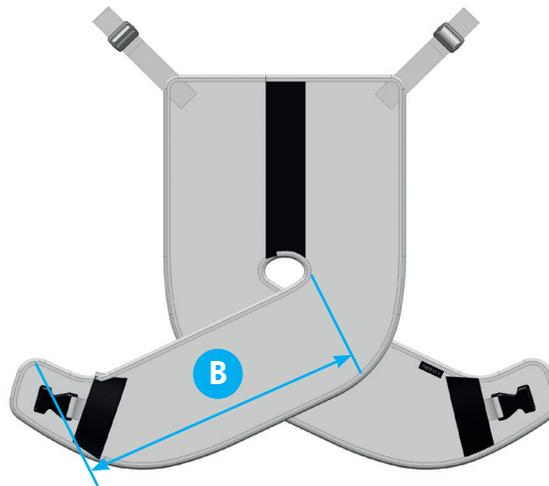

B	Taille
17-24 cm	XS
24-26 cm	S
27-32 cm	M
33-38 cm	L

# COMMENT MESURER?

## Neo 40.01 Support Mollet

Mesurez la distance entre les tubes principaux du repose-pieds et reportez cette dimension dans le tableau ci-dessous pour trouver la bonne taille.



A	Taille
18-24 cm	S
25-32 cm	M
33-40 cm	L
40-50 cm	XL

# COMMENT MESURER?

## Neo 40.02 Support Cheville

Mesurez le périmètre de la cheville et reportez cette dimension dans le tableau ci-dessous pour trouver la bonne taille.



	Taille
14-17	XS
17-20	S
19-23	M
22-29	L
28-33	XL

