

MANUEL D'INSTRUCTION

Pouf repose-pieds



Nous tenons tout d'abord à vous remercier pour la confiance que vous nous accordez en optant pour un produit **VERMEIREN**.

Avant d'utiliser le produit, lisez attentivement le mode d'emploi; il vous permettra de vous familiariser avec la manipulation de ce produit.

Il contient également des instructions sur l'entretien de votre pouf repose-pieds. N'oubliez pas que le respect de nos instructions vous permettra de conserver votre chaise en parfait état de conservation et de fonctionnement, même après des années d'utilisation.

Pour toute question, consultez votre distributeur.

Pour trouver un service d'entretien ou un revendeur spécialisé près de chez vous, contactez l'établissement Vermeiren le plus proche.

Caractéristiques techniques

Hauteur:	460 mm
Largeur:	490 mm
Longueur:	480 mm
Angle minimale:	-25°
Angle maximale:	0
Poids:	5 kg

Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques. Tolérance de mesure
+/- 15 mm / 1,5 kg

ÉTENDUE DE LA LIVRAISON

Déballez le produit et contrôlez si la livraison est complète. Se trouvent dans le paquet:

- Pouf repose-pieds
- Mode d'emploi

Vérifiez bien que le colis n'ait pas subi de dégâts pendant le transport. Si vous constatez que ce produit ou le colis présente, contre toute attente, des défauts, procédez comme suit:
Déposez immédiatement une déclaration auprès du transporteur;
Faites enregistrer les dégâts;
Informez votre revendeur immédiatement.

MONTAGE

Le pouf repose-pieds est livré entièrement monté. Posez le pouf repose-pieds exclusivement sur des surfaces planes; les quatre pieds du pouf doivent reposer fermement sur le sol.

RÉGLAGE D'ANGLE

Tirez le pouf devant vers le haut à la hauteur souhaitée.



Pour l'abaisser, tirer la surface rembourrée en position maximale. La crémaillère se débloque. Vous pouvez relâcher lentement la surface rembourrée.

SÉCURITÉ

- Lorsque vous transportez le pouf, faites attention à ne pas vous pincer ou vous couper - Risque de blessure !
- Avant chaque utilisation, vérifiez que les quatre pieds reposent uniformément sur le sol - Risque de basculement du pouf.
- Les réparations et la désinfection ne peuvent être effectuées que par un personnel autorisé !
- Ne mettez pas vos doigts entre le mécanisme de réglage d'angle.
- Ne vous tenez pas debout sur le pouf.
- Risque de brûlures – Soyez prudents lorsque vous utilisez ce produit dans des environnements chauds ou froids, il pourrait être à une température dangereuse.
- Suivez les instructions pour les soins et le contrôle. Le fabricant n'offre aucune garantie si le siège si celui-ci n'est pas utilisé conformément à sa destination et si les contrôles mentionnés dans le mode d'emploi n'ont pas été effectués.

ENTRETIEN

Respectez les instructions suivantes pour le nettoyage:

- **Rembourrage / cadre**
 - Nettoyez l'assise et le dossier à l'aide d'un chiffon humidifié avec de l'eau chaude. Veillez à ne pas tremper le rembourrage / cadre.
 - Utilisez un détergent doux vendu dans le commerce pour enlever les taches rebelles.

- Vous pouvez utiliser une éponge ou une brosse douce pour éliminer les taches.
- N'utilisez pas de produits de nettoyage agressifs tels que des solvants ni de brosses à poils durs.
- N'utilisez jamais de vapeur ni de nettoyeur haute pression pour le nettoyage.
- Le fabricant décline toute responsabilité pour les dégâts occasionnés par l'emploi d'un produit de nettoyage inapproprié.

- **Couche de surface**

La grande qualité de la couche de surface garantit une protection optimale contre la corrosion. Si la couche externe est endommagée par une rayure ou autre, faites réparer la surface concernée par votre distributeur.

Pour le nettoyage, utilisez exclusivement de l'eau chaude et des détergents domestiques normaux avec des brosses ou tissus doux. Veillez à ne pas faire entrer d'humidité dans les tubes.

À l'origine, les pièces en zinc n'ont besoin que d'être frottées avec un tissu sec. Vous pouvez éliminer les taches rebelles avec un polish pour zinc du commerce.

MAINTENANCE

La durée de vie du pouf repose-pieds est influencée par son utilisation, de son stockage, de sa maintenance régulière, de l'entretien et du nettoyage.

Il faut faire contrôler le pouf repose-pieds au minimum tous les deux ans par des personnes autorisées, mais au moins avant chaque réutilisation. Il faut contrôler les paramètres suivants :

- Contrôle des pièces du cadre pour la déformation plastique et les défauts de fonctionnement
- Contrôle visuel des dégâts à la peinture (risque de corrosion).
- Contrôle de l'état du rembourrage (fissures, zones cassantes, pénétration de l'humidité)
- Livrée complète ?
- Mode d'emploi présent ?
- Nettoyage

Faites confirmer l'entretien dans le programme d'entretien quand au moins les profils précités ont été au moins contrôlés. Si votre revendeur n'effectue aucun entretien sur votre demande, prenez contact avec le fabricant. Nous vous indiquerons les revendeurs agréés dans votre région.

DÉSINFECTION

Toutes les pièces du pouf repose-pieds peuvent être traitées par récurage avec un désinfectant. En général, toutes les surfaces d'un système ou d'un produit sont désinfectées avant le transfert à un autre utilisateur (réutilisation).

→ Les produits de désinfection ne peuvent être utilisés que par un personnel qualifié agréé qui a suivi une formation sur leur mode de fonctionnement et leur utilisation.

→ Utilisez des vêtements de protection appropriés. Le désinfectant peut en effet provoquer des irritations en cas de contact avec la peau. Suivez également la notice jointe aux solutions utilisées.

→ Le fabricant décline toute responsabilité pour les dégâts dus à des erreurs de manipulation des désinfectants.

Utilisez exclusivement les produits désinfectants repris dans la liste actuelle du Robert Koch-Institut et la procédure homologuée de désinfection par brossage et par frottement.

L'état actuel des désinfectants présents dans la liste RKI est disponible auprès du Robert Koch Institute (RKI) (page d'accueil : www.rki.de).

EXPEDITION ET STOCKAGE

Pour emballer ou conserver le pouf repose-pieds pour le transfert vers la baignoire, il faut suivre les instructions suivantes :

- Stocker uniquement dans des endroits secs (entre +5°C et +41°C).
- À une humidité relative de 30 % à 70 %.
- Utilisez suffisamment de protections ou emballages pour mettre les béquilles à l'abri de la rouille et des corps étrangers (Par exemple eau salée, air salin, sable, poussière).

GARANTIE

Extrait des conditions générales de vente :

(...)

5. La durée de garantie est de 24 mois.

(...)

La garantie exclut les dommages liés à des modifications structurelles apportées à nos produits, à une maintenance insuffisante, à une manipulation ou un stockage déficients ou inappropriés ou à l'utilisation de pièces autres que les pièces d'origine.

RECYCLAGE

Lors de la mise au rebut du pouf repose-pieds, contactez votre centre de collecte local ou retournez le produit à votre distributeur. Après un nettoyage hygiénique, celui-ci peut renvoyer le pouf repose-pieds et se charger de sa mise au rebut et de son recyclage adapté, en séparant les différents matériaux entrant dans sa composition.

Les emballages peuvent être déposés dans des centres de collecte ou de recyclage ou après de votre distributeur.

PROGRAMME D'ENTRETIEN

Le pouf repose-pieds a été contrôlée :

Cachet du revendeur :

Date :

Les listes des contrôles à effectuer lors des entretiens de même que toute autre information technique sont disponibles auprès de nos filiales. Pour de plus amples informations, consultez le site: www.vermeiren.fr, www.vermeiren.be



VERMEIREN GROUP

Vermeirenplein 1 / 15
2920 Kalmthout

Tél. : +32(0)3 620 20 20
Fax : +32(0)3 666 48 94
website: www.vermeiren.be
e-mail: info@vermeiren.be